

MEDDISCOUNT

Meddiscount Handels-GmbH
A-7035 Steinbrunn, Goldbergweg 3-5
Tel.: +43 2252 77111 Fax: +43 2252 77112
e-mail: office@meddiscount.at



Obstetric Suction Cup Application

Vielseitig

Effektiv

Ökonomisch



Osca Typ-C Sectio Vakuum Handpumpe

Die Vakuum Handpumpe ist ein einfaches, effektives und vielseitig einsetzbares Instrument zur vaginal operativen Entbindung, sie eignet sich für alle fetalen Lagen und hat eine Sectio Zulassung.

Vertrieb Österreich

Meddiscount Handels-GmbH

Goldbergweg 3-5 / A-7035 Steinbrunn

Tel. +43 2252 77 111 / Fax +43 2252 77 112

office@meddiscount.at

Ihr Berater

Michael Ganz

Tel. +43 650 5 43 44 45

m.ganz@meddiscount.at

CE 0123, Class IIa

Hersteller: Beijing HangTian KaDi Technology R&D Room 301, Building No.13-15 Jing Sheng Nan Er Street
Thongzou District 101102Beijing-People's Republic of China



Funktionsprinzip

Die Osca Typ-C Sectio Vakuum-Handpumpe ist vor allem für einen Einsatz bei Kaiserschnittentbindungen und im engen unteren Gebärmutterabschnitt ausgelegt.

Das flache Profil des Cups erleichtert die Einführung, senkt das Risiko traumatischer oder kontrollierter Verlängerungen des Gebärmutterchnitts und gewährleistet ein Höchstmaß an Manövrierfähigkeit.

Sie ist besonders geeignet für fehlgeschlagene Vaginalgeburten, wenn der Kopf des Kindes zum Teil bereits in den Geburtskanal eingetreten und ein Notkaiserschnitt angezeigt ist.

Angesichts der zunehmenden Zahl an Kaiserschnitten erweist sich die Typ-C Sectio Cup als wirkungsvolles Hilfsmittel für den Arzt, um Risiken, die mit diesem chirurgischen Eingriff verbunden sind, zu reduzieren.

Die Verwendung bei Kaiserschnitten reduziert den Blutverlust und das Risiko einer Verlängerung des Gebärmutterchnitts sowie einer Verletzung des Gebärmutterhalses.

Sobald die Glocke richtig positioniert ist, erzeugt der Anwender mit Pumpbewegungen über die Handpumpe ein Vakuum, welches auf die Kopfhaut wirkt und über eine farbcodierte Vakuum Anzeige kontrollierbar ist. Dies hat zur Folge, dass der Kopf des Kindes stabilisiert und sicher fixiert wird.

Das flexible Zugseil ermöglicht eine hohe Bewegungsfreiheit und Orientierung sowie effektive Traktion, während der mütterlichen Kontraktion.

Vertrieb Österreich

Meddiscount Handels-GmbH

Goldbergweg 3-5 / A-7035 Steinbrunn
Tel. +43 2252 77 111 / Fax +43 2252 77 112
office@meddiscount.at

Produkteigenschaften:

- dünneres Cup Profil, dadurch optimal für den Einsatz bei Kaiserschnitt geeignet.
- durch den speziellen Baffle Filter wird das Vakuum an der Innenseite der Cup Glocke optimal verteilt.
- Handgriff für ergonomische und effiziente Anwendung mit farbcodierter Skala zur Anzeige des Unterdrucks der auf die fetale Kopfhaut wirkt.
- Integrierter Druckknopf für schnelles Lösen des Vakuums
- Flexibler Schlauch mit Zugseil in der Mitte der Glocke befestigt. Seine Flexibilität ermöglicht einen Zugwinkel von 180°. Er verfügt über 2 Markierungen (6cm und 11cm), mit denen der Einführabstand sowie die Höhe des Köpfchens beurteilt werden können.
- Latexfreies System, DEHP-frei (Di-2-ethylhexylphthalat), BPA-frei (Bisphenol A)
- Einzel steril verpackt
- 1VE = 5 Stück

Ihr Berater

Michael Ganz

Tel. +43 650 5 43 44 45
m.ganz@meddiscount.at